

Инструкция по оформлению и использованию подписки «ЭКГплюс»


Для пользователей кардиофлешек ECG Dongle, ECG Dongle Full и мини-кардиографа «Сердечко» доступна возможность оформления подписки «ЭКГплюс» (далее - подписка).

Подписка позволяет использовать весь функционал облачного сервиса «Кардио-Облако» без ограничений.

Основные возможности подписки

- Полная автоматическая расшифровка ЭКГ (далее - автоанализ) по опасным и важным патологиям.
- Анализ вариабельности сердечного ритма (ПАРС).
- Скачивание ЭКГ в формате PDF без просмотра рекламы.


Оформление подписки

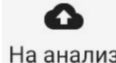1. Снимите ЭКГ в приложении ECG Dongle или ECG Audio.
2. После завершения записи нажмите  в нижнем меню приложения.
3. Введите запрашиваемые данные. Поля, отмеченные [*], обязательны для заполнения.
4. Установите флажок для переключателя «Я ознакомился и согласен с договором оферты».
5. Нажмите на кнопку . После отправки исследования в сервис на указанный адрес эл. почты придет письмо со ссылкой на страницу исследования. Также ссылка будет на экране подтверждения отправки.
6. Перейдите на страницу исследования по ссылке из приложения или электронного письма.
7. На странице исследования в столбце «Проверка компьютером» нажмите на необходимый план подписки.
8. На странице подтверждения тарифного плана проверьте корректность выбора, установите флажок согласия с условиями оферты и перейдите на страницу оплаты.
9. После успешной оплаты вы будете перенаправлены на страницу исследования с разблокированными данными автоанализа и возможностью перехода на страницу анализа вариабельности сердечного ритма (ПАРС).

Использование подписки

Использование подписки не требует никаких дополнительных действий и не имеет ограничений по количеству отправляемых в сервис исследований.

Статус подписки, срок действия и возможность управления автоматическим продлением доступны в официальном telegram-боте CardioCloud BOT по ссылке: https://t.me/CardioCloud_techbot или QR-коду.

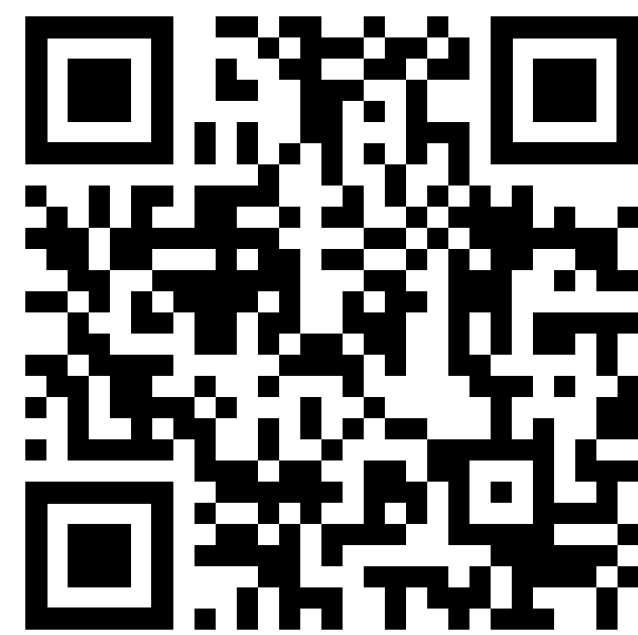

Подписка «ЭКГплюс» позволяет заботиться о состоянии своего сердца не меняя привычный образ жизни:

- Расшифровка ЭКГ в любое время и в любом месте при наличии доступа в сеть Internet.
- Не требуется посещения врача для снятия и расшифровки ЭКГ.
- Возможность расшифровки ЭКГ специалистом.
- Структурированное хранение исследований и доступ к ним в любое время.
- Скидки при оформлении подписки на полгода и год.

Телефон службы поддержки: 8 800 350-98-92

Сайт: cardio-cloud.ru